

Handleiding Aerogen® Ultra



1. Plaats de Aerogen Solo in de Aerogen Ultra. Zorg voor de juiste oriëntatie.



2. Indien er een gezichtsmasker nodig is verwijder dan het Aerogen Ultra mondstuk en bevestig het gezichtsmasker. Bij het gebruiken van een open gezichtsmasker is er een minimaal zuurstofdebiet van 1LPM nodig.



3. Als er extra zuurstof nodig is, bevestig dan de zuurstofslang stevig aan de Aerogen Ultra. Het zuurstofdebiet moet worden ingesteld tussen 1-6LPM.



4. Open het afdekkapje van de Aerogen Solo, plaats de medicatie en sluit het afdekkapje.



5. Sluit de kabel aan op de Aerogen Solo en de Aerogen Pro-X of Aerogen USB Controller.



6. Houd de aan/uitknop op één van beide Aerogen Controllers gedurende 1 seconde ingedrukt om de 30 minutenmodus te selecteren. Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt vanuit de uit-stand voor de volgende werking:
a. Aerogen Pro-X Controller in continue modus
b. Aerogen USB Controller in 6 -uurs modus
Controleer visueel of er aerosol wordt geproduceerd.



Scan de QR code voor de instructie video

/ Discover Better

Aerogen®

*Maskers voor volwassenen of kinderen zijn niet op alle markten beschikbaar.

Notie: De aerosol wordt opgevangen in de vernevelkamer van de Aerogen Ultra. Als een patiënt inademt ziet U dat er een bolus aerosol vrijkomt.

Waarschuwing: Enkel opgeleide personen mogen het Aerogen Solo Systeem bedienen, inclusief Aerogen Solo, Aerogen Ultra en de bijhorende accessoires. Lees en bestudeer alle instructies voordat u het Aerogen Solo Systeem en de accessoires gebruikt. Raadpleeg de volledige lijst met waarschuwingen in de sectie Waarschuwingen 30-354 Rev U Aerogen Solo Instructie handleiding en 30-809 Rev B Aerogen Ultra Instructie handleiding.

Aerogen Ultra Waarschuwingen: Niet gebruiken met een gesloten gezichtsmasker. Gebruik met een opengezichtsmasker altijd een extra zuurstofdebiet van 1-6LPM. De prestaties van de Aerogen Ultra kunnen variëren afhankelijk van het type medicijn en de Aerogen Ultra configuratie die wordt gebruikt. Overschrijd het aanbevolen zuurstof debiet niet. Controleer de Aerogen Ultra na het spoelen visueel om er zeker van te zijn dat de kleppen niet zijn losgeraakt. Alleen te gebruiken door opgeleid medisch personeel. Alleen te gebruiken met de aanbevolen componenten. Zorg ervoor dat de slang veilig is georiënteerd om wurmingsgevaar te voorkomen. Zorg ervoor dat de zuurstofslangaansluitpoort of slang niet is afgesloten. Gebruik de Aerogen Ultra niet zonder mondstuk of gezichtsmasker. Autoclaaf geen enkel onderdeel van deze kit. Dek de Aerogen Ultra ventielen niet af tijdens gebruik.

EU-2757-1-NL ©Aerogen 2024