

# ZIPTUBE Standard (bleu)

Fiche technique



Informations produit	
Matériau:	Doublure en polyester avec revêtement PVC double face, finition anti-salissures. Couleur standard : bleu, intérieur noir.
Fermeture éclair:	Spirale en plastique, 6,5 mm, divisible, équipée d'un dispositif en alliage GD-Zn AL 4 Cu 1/inox avec verrouillage automatique. Bande textile en polyester de 16 mm.
Coutures	Polyester, résistance 750 dtex.
Instructions d'utilisation:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrez complètement la fermeture éclair.</li><li>• Placez les câbles à l'intérieur.</li><li>• Refermez la fermeture éclair.</li></ul>
Entretien du produit (la stérilisation en autoclave n'est pas autorisée)	
Désinfection de surface:	Désinfectants de surface à base d'alcool, sous forme de spray ou de lingettes, tels que Gungs Propano® AF, Terralin® liquid, esteer® lingettes désinfectantes.  Les désinfectants de surface sans alcool ne sont pas recommandés, car ils peuvent provoquer une décoloration au fil du temps.
Instructions de lavage:	Jusqu'à 60 degrés avec des détergents doux disponibles dans le commerce.
<p>*Attention : La stérilisation en autoclave n'est pas autorisée. Cette fiche technique s'applique uniquement à nos produits avec des matériaux de support gris, blanc et noir. En raison des diverses applications possibles de nos produits, nous recommandons aux utilisateurs de réaliser des tests avant leur utilisation.</p> <p>La société ZIPTUBE s'engage à produire des articles de la plus haute qualité, en utilisant uniquement des matériaux de premier choix. Cependant, veuillez noter que ces accessoires textiles peuvent avoir une durée de vie limitée en raison des exigences élevées liées à leur utilisation, leur nettoyage et leur désinfection.</p>	

# ZIPTUBE light (gris, blanc et noir\*)

## Fiches techniques



Informations produit	
Matériau:	Polyester avec revêtement PVC double face, 430 g/m <sup>2</sup> , finition anti-salissures. Couleur standard: gris.
Fermeture éclair:	Spirale en plastique, 4 mm, divisible avec verrouillage automatique. Bande textile en polyester de 12 mm.
Coutures	Polyester, résistance 750 dtex.
Instructions d'utilisation:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrez complètement la fermeture éclair.</li><li>• Placez les câbles à l'intérieur.</li><li>• Refermez la fermeture éclair.</li></ul>
Entretien du produit (la stérilisation en autoclave n'est pas autorisée)	
Désinfection de surface:	Désinfectants de surface à base d'alcool, sous forme de spray ou de lingettes, tels que Gungs Propano® AF, Terralin® liquid, esteer® lingettes désinfectantes.  Les désinfectants de surface sans alcool ne sont pas recommandés, car ils peuvent provoquer une décoloration au fil du temps.
Instructions de lavage:	Jusqu'à 60 degrés avec des détergents doux disponibles dans le commerce.
<p>*Attention : La stérilisation en autoclave n'est pas autorisée. Cette fiche technique s'applique uniquement à nos produits avec des matériaux de support gris, blanc et noir. En raison des diverses applications possibles de nos produits, nous recommandons aux utilisateurs de réaliser des tests avant leur utilisation.</p> <p>La société ZIPTUBE s'engage à produire des articles de la plus haute qualité, en utilisant uniquement des matériaux de premier choix. Cependant, veuillez noter que ces accessoires textiles peuvent avoir une durée de vie limitée en raison des exigences élevées liées à leur utilisation, leur nettoyage et leur désinfection.</p>	